

Fiche Produit

Masque Chirurgical Type IIR

Référence : LM2504



Norme : EN14683+AC:2019 IIR, relative au règlement (EU) 2017/745/UE

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Masques chirurgicaux Type IIR à usage unique, non stériles

Masque destiné à empêcher les germes présents dans les voies respiratoires de sortir et de contaminer l'entourage. Permet de limiter la transmission des virus aéroportés par les personnes infectées. Ce masque est résistant à la projection pour réduire l'exposition potentielle du porteur au sang et aux liquides corporels. Ce masque est adapté au milieu hospitalier, pour un usage médical.



CONFORMITÉ DU PRODUIT

Masques conformes aux dispositions réglementaires suivantes :

- Norme harmonisée **EN 14683+AC : 2019 (Type IIR)** qui évalue l'efficacité du matériau filtrant dans le sens de l'expiration.
- Règlement UE **2017/745/UE**.
- Marquage **CE**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masques non stériles à USAGE UNIQUE

Efficacité de filtration bactérienne : BFE ≥ 98 %

Réspirabilité : < 60 pa/cm²

Bioburden : < 30 Cfu/G

Couches : 3

Durée de vie : 5 ans

Utilisation unique : efficace 4h

Dimensions du masque : 9.5 x 17.5cm

COMPOSITION DU MASQUE

- 35% couche de PP non-tissé,
- 30% couche de PP non-tissé soufflé par fusion,
- 35% couche de PP non-tissé.
- Une barette nasale pour une meilleure étanchéité
- Une couche interne et externe ultra déperlante
- Avec élastiques
- Sans latex



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



- Tirez et déployez le masque à deux mains pour vous assurer que le pince-nez est vers le haut.
- Tenez le masque sur le visage et tirez la bande élastique jusqu'aux oreilles.
- Appuyez sur le clip du nez pour épouser la forme du nez.
- Durée de vie : 4h. Ne pas réutiliser.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

LIMITES D'UTILISATION : Dispositif à usage unique. Utiliser 2 à 3 masques par jour par personne.

STOCKAGE : Les masques ont une durée de conservation limitée et doivent être stockés dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité entre 10 et 25°C.

AVERTISSEMENT : Il est essentiel que le masque soit enlevé en dernier, après tout autre matériel de protection (gants, surblouse, lunettes de protection) afin de limiter au maximum tout risque de contamination. Les mains doivent impérativement être désinfectées après le retrait du masque.

RENSEIGNEMENTS FABRICANT / MANDATAIRE EUROPÉEN / IMPORTATEUR / DISTRIBUTEUR

FABRICANT : SUNSMED PROTECTIVE PRODUCTS LTD – NO.18, Industrial Park, Maouzui Town, Xiantao City, Hubei Province, China

MANDATAIRE EUROPÉEN : SUNGO EUROPE B.V. – Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

IMPORTATEUR - DISTRIBUTEUR : JSE MEDICAL (marque appartenant au groupe JSE GROUPE) – 29 Avenue Anatole France, 94220 Charenton le Pont, France

📧 info@jsegroupe.com ☎️ +33(0)180915383 🔗 www.jsegroupe.com

BOÎTE

Quantité

50 pièces / boîte

Dimensions boîte

18 x 10 x 7,7 cm

Traduction en 5 langues

 Français

 Allemand

 Anglais

 Italien

 Espagnol

CARTON

Quantité

40 boîtes/ carton


2 000 pcs/ carton

Dimensions du carton

52 x 38 x 30 cm

Poids

7,8 KG/ carton

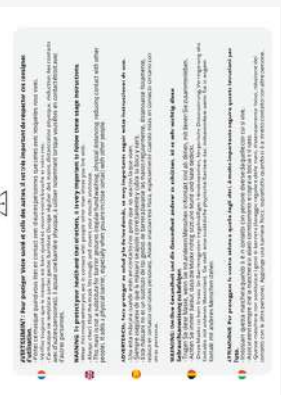

BOÎTE

Quantité

50 pièces / boîte

Dimensions boîte

16 x 10 x 7,7 cm

Traduction en 6 langues



Français



Allemand



Anglais



Italien



Espagnol

CARTON

Quantité

40 boîtes/ carton

2 000 pcs/ carton

Dimensions du carton

52 x 33 x 34 cm

Poids

7,5 KG/ carton

